



- ✓ NU ESTE COROZIV
- ✓ NU CONȚINE ALCOOL
- ✓ ARE EFECT BACTERICID, FUNGICID, MYCOBACTERICID, TUBERCULOCID, VIRUCID
- ✓ NU DECOLOREAZĂ, NU ALBEȘTE, NU PĂTEAZĂ
- ✓ NU ARE ACȚIUNE IRITANTĂ ASUPRA PIELII, CĂILOR RESPIRATORII, MUCOASEI OCULARE ȘI BUCALE ȘI NU NECESITĂ UTILIZARE ÎN ÎNCĂPERI CU VENTILAȚIE SPECIALĂ

DISPOZITIV MEDICAL  
clasa IIa

FABRICAT ÎN MAREA BRITANIE

# Chemgene HLD4H Concentrat

Dezinfectant pentru suprafețe și echipamente medicale, inclusiv echipamente din laboratoare medicale

## Dezinfectant concentrat fără alcool



### DATE CHIMICE ALE CHEMGENE HLD4H CONCENTRAT

Conține: digluconat de clorhexedrină, clorură de didecil dimeti amoniu <10%

Aspect: lichid albastru deschis

### CÂND SĂ FOLOSIȚI CHEMGENE HLD4H CONCENTRAT ?

Folosiți Chemgene HLD4H pentru curățarea și dezinfecția suprafețelor dure din toate zonele medicale. Poate fi utilizat pe orice categorie de material (covor PVC tip Tarkett, inox, plastic etc).

Nu folosiți Chemgene HLD4H pentru dezinfecția dispozitivelor medicale invazive.

### MOD DE UTILIZARE

1. Chemgene HLD4H este un produs concentrat, care trebuie diluat înainte de utilizare. Alegeți concentrația dorită.
2. Ștergeți suprafețele respective cu soluția preparată de Chemgene HLD4H și asigurați-vă că suprafețele care urmează a fi dezinfectate sunt complet umede.
3. Lăsați Chemgene HLD4H să-și facă efectul în timpul indicat pentru concentrația aleasă.
4. Nu necesită clătire.

### DATE MICROBIOLOGICE ALE CHEMGENE HLD4H CONCENTRAT

Chemgene HLD4H Concentrat are efect bactericid, fungicid, mycobactericid, tuberculocid și virucid.

Concentrații de utilizare: 2% - 5%.

### CHEMGENE HLD4H CONCENTRAT ESTE DISPONIBIL ÎN URMĂTOARELE FORME

Flacon 1L, cu sistem dozare